



Test na ojcostwo z włosów, chusteczki higienicznej i innych mikrośladów...

Mikroślady to inaczej przedmioty, na których mogą znajdować się śladowe ilości niewidocznego gołym okiem ludzkiego DNA. Są to **przedmioty codziennego użytku, takie jak szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, chusteczka z katarem lub włosy z cebulkami, plamy krwi, plamy nasienia i wiele innych.**

Mikroślady można wykorzystać na przykład wtedy, gdy **potencjalny ojciec nie żyje lub gdy, wiadomo, że takie badanie będzie bardziej komfortowe dla dziecka.**


Jaka jest pewność badania ojcostwa z mikrośladów

Wiarygodność testów opartych na mikrośladach jest **identyczna jak przy wykorzystaniu wymazów z policzka.** A to dlatego, że DNA jest wszędzie takie samo, bez względu na miejsce, z którego zostanie pobrane.



Badanie ojcostwa z mikrośladów w 3 krokach

1. Skontaktuj się z nami – telefonicznie, e-mailowo, na czacie online
2. Przygotuj próbki mikrośladowe – i wyślij je
3. Odbierz wynik badania

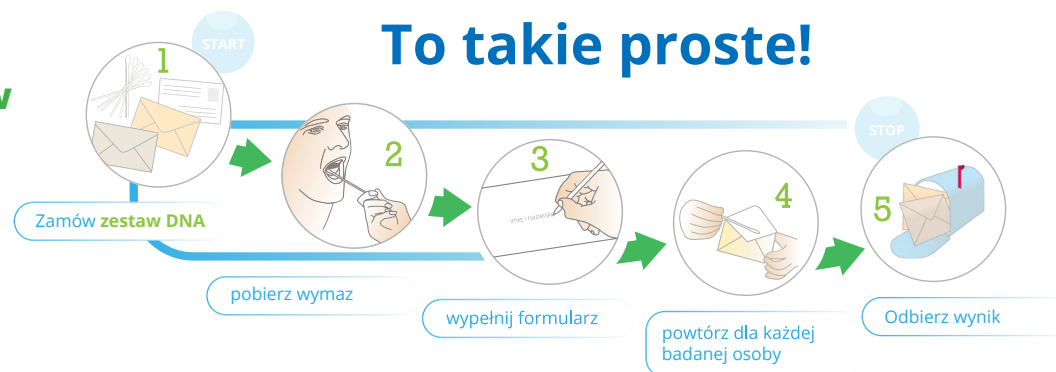

Możesz również przynieść mikrośląd do przychodni i pobrać wymazy z policzka od siebie na miejscu.

Najczęściej badane próbki nietypowe:


→ **WŁOSY**

- muszą mieć cebulki widoczne gołym okiem – w badaniu analizujemy fragment naskórka otaczającego cebulkę
- minimalna ilość włosów, jakie należy włączyć do analizy wynosi 5 sztuk
- włosy powinny być wyrwane z głowy, nie mogą pochodzić np. ze szczotki czy grzebienia



→ **PLAMY KRWI**

- powinny być wcześniej dobrze wysuszone
- mogą być zachowane na różnych nawierzchniach – ubraniu, plastrze, podpasce czy tamponie

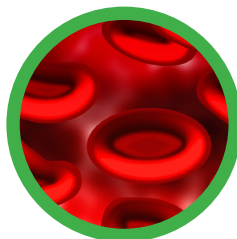

→ **SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW**

- musi mieć wyraźne ślady korzystania
- musi być używana przez jedną osobę



→ **MASZYNKA DO GOLENIA**

- użyta co najmniej kilkukrotnie
- używana zawsze przez tę samą osobę



→ **CHUSTECZKA DO NOSA**

- zawierająca śluz z nosa w postaci kataru
- nie powinna być to chusteczka zapachowa
- nie powinna zawierać resztek jedzenia i makijażu



→ **PATYCZKI DO CZYSZCZENIA USZU**

- na powierzchni patyczka musi się znajdować woskowina uszna



→ PASEK Z GLUKOMETRU

- najlepiej umieścić go w czystej kopercie lub kupionym w aptece sterylnym pojemniczku na mocz



→ GUMA DO ŻUCIA

- powinna być żuta przynajmniej przez kilka minut
- najlepiej jeśli jest to guma biała



→ SZTUĆCE/SZKLANKI/ KUBKI/PUSZKI PO NAPOJACH

- muszą być używane tylko przez jedną osobę
- nie mogą być umyte/wypłukane



→ BIELIZNA OSOBISTA

- z wydzieliną biologiczną w postaci spermy lub śluzu
- nie może być prana



→ NIEDOPAŁEK PAPIEROSA (filtr)

- używany tylko przez jedną osobę
- najlepiej umieścić taki filtr w czystej kopercie lub kupionym w aptece sterylnym pojemniczku na mocz



→ SMOCZKI/GRYZAKI DZIECIĘCE

- nie należy ich wcześniej sterylizować lub gotować
- powinny być zabezpieczone do transportu tak, aby nie stykały się z żadną niesterylną powierzchnią



WAŻNE: Wybierz mikroślad, który miał tylko jednego „właściciela”, to znaczy, że był używany tylko przez jedną osobę.

Jeśli są Państwo w posiadaniu innych przedmiotów niż te z listy powyżej, ale nie mają pewności czy byłyby one dobrym materiałem do analizy, prosimy o kontakt z Centrum Genetyki GenLab. Nasi konsultanci ocenią ich użyteczność w badaniu. Jeśli okaże się, że mikroślady te nie będą mogły zostać wykorzystane, wtedy proponujemy Państwu włączenie innych.



(22) 100 36 15



Jak prawidłowo zabezpieczyć próbki mikrośladowe?

Przy zbieraniu mikrośladów prosimy nie dotykać ich gołymi rękami, aby nie doszło do zanieczyszczenia materiału własnym DNA. Próbki tego rodzaju najlepiej chwytać **w rękawiczkach** lub ewentualnie przez foliowy woreczek. Mokre lub wilgotne próbki: krew, chusteczkę z wydzieliną z nosa, szczoteczkę do zębów czy golarkę, trzeba pozostawić do wyschnięcia.

Zalecamy, aby zebrane próbki mikrośladowe wsadzić do **sterylnego pojemniczka na mocz, albo czystej papierowej koperty i odesłać pocztą lub przynieść samodzielnie do przychodni.**

Prosimy nie zwlekać z dostarczeniem materiałów, najlepiej jeśli nastąpi to do 2-3 dni od pobrania.

Przed wysłaniem próbek do laboratorium prosimy przechowywać je w takim miejscu, aby nie były narażone na działanie wysokiej temperatury, promieni UV i wilgoci.



Pacjenci GenLab objęci są bezpłatnym ubezpieczeniem próbek. Jeśli analiza pierwszej próbki mikrośladowej nie pozwoli na wystawienie wyniku, wówczas badanie drugiej próbki jest bezpłatne!


O co najczęściej pytają pacjenci

Czy wynik badania ojcostwa z mikrośladów będzie wiarygodny?

TAK! Wynik testu na ustalenie ojcostwa z udziałem próbek mikrośladowych pozwala na jednoznaczne potwierdzenie lub wykluczenie. Będzie zatem tak samo pewny jak wtedy, gdy w teście weźmiemy pod uwagę wymaz policzkowy.

A co jeśli okaże się, że próbki nie nadają się do badania?

Jeśli po wstępnej analizie próbek laboratorium stwierdzi, że DNA występuje w nich w zbyt małej ilości lub jest za bardzo zdegenerowane, wtedy poprosi o dołączenie kolejnych. Co więcej, jeśli analiza pierwszej próbki mikrośladowej nie pozwoli

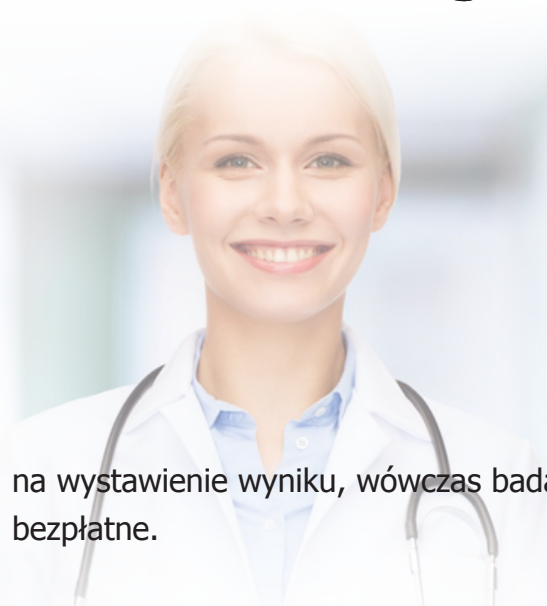

na wystawienie wyniku, wówczas badanie drugiej próbki jest bezpłatne.

Dlaczego za test na ojcostwo z mikrośladów zapłacimy więcej niż za badanie wymazów z policzka?

Analiza DNA z próbek mikrośladowych wymaga zastosowania bardziej czułych metod niż analiza wymazów z policzka.

Ile czeka się na wynik badania ojcostwa z udziałem mikrośladów?

Na wynik analizy genetycznej z udziałem mikrośladów czeka się od 5 do 10 dni roboczych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat testów na ojcostwo i próbek nietypowych?


Skontaktuj się z nami:

Jesteśmy dostępni codziennie: w tygodniu od 8.00 do 24.00, w weekendy i w święta od 8.00 do 21.00.

 Telefonicznie: (22) 100 36 15

 E-mailowo: biuro@genlab.pl

 Na anonimowym czacie na naszej stronie internetowej genlab.pl

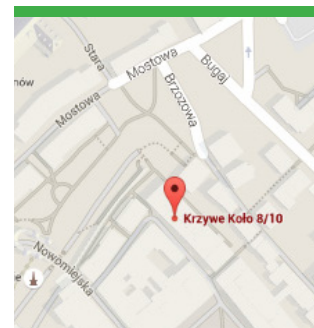

Centrum Genetyki GenLab
- Centralny Punkt Pobrań w Warszawie
Medina NZOZ
ul. Krzywe Koło 8/10
02-776 Warszawa

Poradnik, który właśnie Państwo czytają został w całości opracowany przez pracowników Centrum Genetyki GenLab.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: genlab.pl